



MEDISEPT

Disinfezione vera



Velox® Oxy ETA

Preparato **sporicida** pronto all'uso per la disinfezione e il lavaggio di superficie di dispositivi medici non invasivi in aree ad alto rischio

Caratteristiche del prodotto:

- Effetto sporicida completo entro 15 minuti. (C.difficile, B.subtilis).
- Azione fungicida completa entro 30 secondi (A.brasiliensis, C.albicans).
- Agisce in 30 secondi sui virus **enveloped** (Vaccina, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) e in 15 secondi sui virus non avvolti (Noro).
- Registrazione: prodotto medico di classe II a.

Benefici per l'utente:

- Efficacia confermata da test secondo le ultime norme armonizzate.
- Riduzione del rischio di infezione in situazioni che richiedono un elevato regime sanitario.
- Effetto rapido di una superficie pulita e disinfettata senza aloni e macchie.
- Privo di aldeidi e fenoli, non danneggia la superficie.
- Applicabile a molte superfici nell'area medica.
- Compatibile con i panni MEDISEPT Dry Wipes.



Spray



Funziona
su Polio, Adeno,
Noro, Spory



Strumenti
per parrucchieri
e bellezza

Velox® Oxy ETA

Applicazione: Velox® Oxy è raccomandato per la disinfezione di superficie di apparecchiature mediche, inclusi lettini e sedie per trattamenti, armadietti per pazienti, apparecchiature medico-chirurgiche, incubatrici, apparecchiature per la riabilitazione, nonché puntali dentali, riuniti, lampade operatorie, piani di lavoro, cucchiai protesici, dentiere e impronte. Velox® Oxy ETA mostra un'elevata tolleranza ai materiali - può essere utilizzato per disinfettare superfici in plastica ABS, materiali per tappezzeria, tra cui pelle naturale, gomma, silicone e altre superfici resistenti all'alcol.

SPETTRO	Norma secondo EN 14885	Alto carico organico
Batteri (incluso MRSA)	EN 13727	15 sek.
	EN 16615	30 sek.
	EN 13697	60 sek.*
Funghi (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	15 sek.
	EN 16615	30 sek.
	EN 13697	60 sek.
Funghi (<i>A. brasiliensis</i>)	EN 13624	30 sek.
	EN 13697	60 sek.
Mycobacteria (<i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i>)	EN 14348	3 min
Virus enveloped	EN 14476	30 sek.
Norovirus	EN 14476	15 sek.
Adenovirus	EN 14476	30 sek.
Poliovirus	EN 14476	15 sek.
Spory (<i>B. subtilis</i>)	EN 13704	10 min
Spory (<i>Cl. difficile</i> R027)	EN 17126	15 min

*condizioni di pulizia

Istruzioni per l'uso: Spruzzare la preparazione da una distanza di 20-30 cm avendo cura di coprire completamente la superficie. Rimuovere l'eccesso di preparazione utilizzando ad esempio un asciugamano monouso. La superficie non necessita di risciacquo con acqua. Per disinfettare superfici particolarmente delicate (es. pelle naturale) si raccomanda una prova in posizione non visibile. Prodotto da utilizzare da un utente professionale. Non combinare con altri agenti di pulizia o disinfezione. Leggere il foglio informativo prima dell'uso.

Composizione: sostanza attiva in 100 g di preparato:

72 g di etanolo (CAS: 64-17-5), 7.2 g propan-2-ol (CAS: 67-63-0), 3 g di perossido di idrogeno (CAS: 7722-84-1)

Imballaggio commerciale:

Bottiglia da 1 l con spruzzatore



La scheda di sicurezza e la scheda degli ingredienti sono disponibili su www.medisept.biz